


Andre alarmer og deres betydning

De fleste av disse alarmene skyldes fuktighet som kommer inn i pumpa. Pumpa bør beskyttes mot fuktighet.

-
- **LEC 1310:** Dette betyr at det er dårlig kontakt til batteriene og at batterikontaktene bør rengjøres eller byttes ut.
 - Prøv å rengjøre batterikontaktene og start pumpa igjen. Dette bør gjøres med en Q-tips vætet med litt 70 % isopropanol på.
 - La kontaktene tørke helt før du setter inn batteriene igjen.
 - Fortsetter feilmeldingen gi pasienten en ny, programmert pumpe.
 - Returner den gamle pumpa til Abbvie.
 - **Alle andre errorkoder/LEC:** Er du sykehuspersonell, gi pasienten en ny, programmert pumpe.
Pumper med feil eller mangler skal sendes i retur til Biofarma. Bestill retur ved å benytte følgende link: www.abbviebestilling.no og velg **Returskjema**.
-

LEC= Last Error Code Legacy.

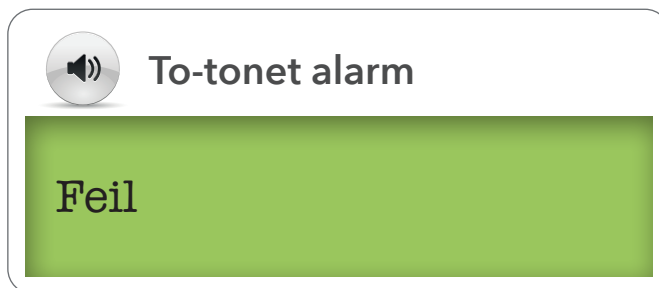

Årsak

- En feil har oppstått.

Handling

- Pasienten må få en ny pumpe.
- Hjemmetjeneste: Ta kontakt med behandlende sykehus.



 **To-tonet alarm**

[Ingen melding]

Årsak

- Batteriene har blitt fjernet mens pumpa gikk eller ca. 15 sekunder etter at pumpa ble slått av. Pumpa er nå stoppet og har ikke strøm.

Handling

- Sett inn batteriene igjen for å stanse alarmen.



To-tonet alarm

Okklusjon
Sjekk iv-slangen

Årsak

- Pumpa har registrert høyt trykk i kassettslange eller sonde. Det kan være forårsaket av knekk på sonden, en lukket sondeklemme eller at den røde proppen på kassettslangen ikke er tatt av. Er det ingen ytre hinder, kan alarmen være forårsaket av en tett sonde. **(se side 21)**

Handling

- Fjern eventuelle ytre hinder for så å starte pumpa igjen.
- Ved å trykke **NESTE** eller **START/STOPP** kan du slå av alarmen i 2 minutter. Fjern eventuelle ytre hinder og start pumpa igjen.
- Finnes det ingen ytre hinder, kan sondesystemet være tett. Skyll sondesystemet. **(se side 22)**



Tre enkle signaler

INF KasVol
Snart tomt

Årsak

- Kassettvolumet er lavt.
- Kassettvolumet må være i bruk om pumpa skal alarmere for tom kassett. Kassettvolum kan benyttes dersom pasienten bruker mer enn en kassett pr døgn.

Handling

- Bytt kassett umiddelbart.
- Bytt kassett og tilbakestill kassettvolumet.



To-tonet alarm

Mangler kassett
Kan ikke startes

Årsak

- Du har prøvd å starte pumpa uten at kassetten er ordentlig tilkoblet. Kassetten må være ordentlig tilkoblet for at pumpa skal fungere.

Handling

- Ved å trykke **START/STOPP** eller **NESTE** kan du slå av alarmen i 2 minutter.
- Koble kassetten ordentlig til.
- Trykk **START/STOPP** for å starte pumpa igjen.



To-tonet alarm

Kassettvolum tomt

Årsak

- Volumet i kassetten er 0,0 ml. Under normale omstendigheter benyttes kassettvolum kun når forskrevet dose overstiger 100 ml i løpet av 16 timer.

Handling

- Ved å trykke **START/STOPP** eller **NESTE** kan du slå av alarmen i 2 minutter.
- Bytt kassett og tilbakestill kassettvolumet.



 Tre to-tonede alarmsignaler
hvert 5. minutt

SvaktBat

Årsak

- Batteriene er svake, men pumpa går fortsatt.

Handling

- Bytt batteriene umiddelbart. (se side 18)
- Hold inne **START/STOPP**-knappen for å starte pumpa igjen.



Ingen alarm

Verdien er
ikke lagret

Årsak

- Endringen ble ikke lagret.
- **BEKREFT/SLETT** ble ikke trykket på etter utført endring.

Handling

- Trykk **NESTE** for å fortsette programmeringen.
- Lagre verdien før du går videre, eller før du starter pumpa.