

Bytte av batteri

1. Stopp pumpe ved å holde inne **START/STOPP**-knappen i 3 sekunder.
2. Skru av pumpe ved å holde inne **AV/PÅ**-knappen i 3 sekunder.
3. Fjern batterilokket ved å trykke ned og holde inne pilknappen på lokket mens lokket skyves av.
4. Fjern de brukte batteriene. Ved å dra i enden av batteristroppen vil batteriene lettere kunne fjernes.
5. Sett inn de nye batteriene slik at +/- merkingen tilsvarer merkingen inni batterikammeret. Sett batteriene inn over toppen av batteristroppen. Pumpe vil pipe når batteriene er satt inn riktig.

Sett batterilokket på igjen. Pumpe vil skrus på automatisk.

