

Har pasienten utviklet granulasjonsvev/villkjøtt?

Forebygging av granulasjonsvev

- Sitter fikseringsplaten for tett på huden?
- For stram fikseringsplate kan irritere huden og forårsake granulasjonsvev/villkjøtt. Pass på at korrekt avstand fra huden opprettholdes (ca. 5-10 mm fra huden) **(se side 34)**.
- Kompressjon med 4-5 kompresser under fikseringsplaten kan forhinde noe smerte dersom fikseringsplaten er irriterende (pass på at det ikke utvikles fukt rundt stomien: hold helst stomien ren, tørr og luftig) **(se side 35)**.

Behandling av granulasjonsvev

- dersom dette blør, gir smerter eller medfører lekkasje
- Diskuter eventuell egnet behandling med lege.