


# Andre kjente komplikasjoner med sondesystemet

## Det er lekkasje i Y- og klikk-koblingen (figur 6, Del E, F, G og H)

- Åpne koblingen der det lekker. Kontroller ved hjelp av koblingsbytteinstruksjonen (finnes i Duodopapermen eller på duodopa.no) at alle deler sitter som de skal.
- Sett sammen igjen de deler av koblingen som ikke sitter slik de skal.
- Skift kobling ved behov.
- Merk at 20 FR PEG trenger annen størrelse på Y-koblingen enn 15 FR PEG.

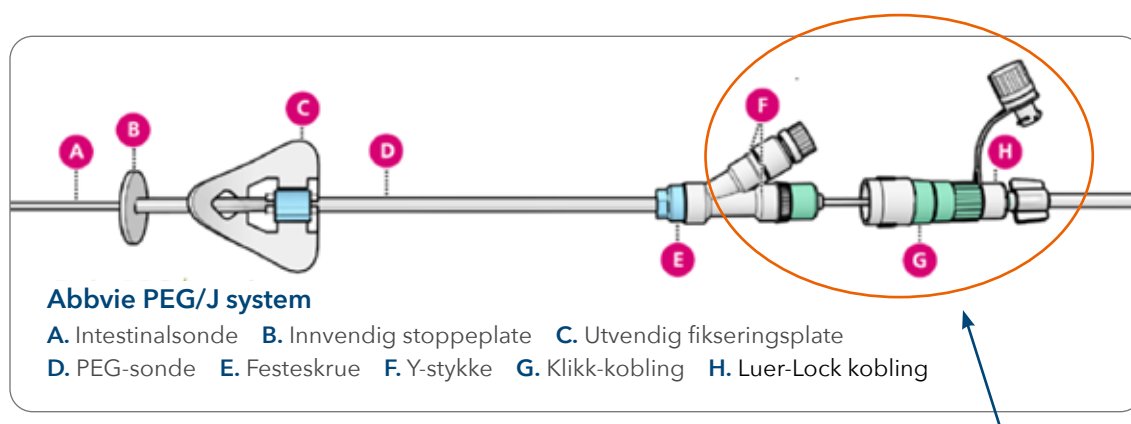

**Figur 6:** Viser Abbvie PEG/J- system 15 FR. Benyttes en 20 FR vil delene på bilde C og E være lilla i stedet for blå.

# Andre kjente komplikasjoner med sondesystemet

## Ytre stoppeplate har sprukket

- Tre ny fikseringsplate over Y-koblingen (figur 7). Fikseringsplaten er elastisk.



Figur 7