


Pasienten opplever lekkasje fra stomiåpningen

Undersøk først følgende

- Sitter ytre fikseringsplate rett? Denne skal sitte 5-10 mm fra huden (figur 8).

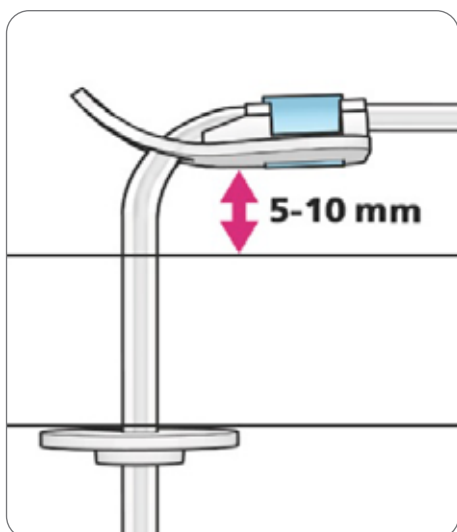

Figur 8: Bilde av fikseringsplatens plassering

- Hvis ytre fikseringsplate ikke sitter som den skal, sitter trolig heller ikke indre stoppeplate mot magesekkens slimhinne og magesaft kan lekke ut **figur 9 (se side 34)**.

Pasienten opplever lekkasje fra stomiåpningen



Figur 9: Bilde fra magens innside som viser
a) korrekt kontakt mellom stoppeplate og magesekkens slimhinne og
b) en stoppeplate som ikke sitter korrekt, og som vil kunne lede til lekkasje av magesaft.

Dersom indre stoppeplate ikke sitter korrekt mot magesekkens slimhinne:

Løsne utvending fikseringsplate og dra forsiktig i PEG til du kjenner motstand fra indre stoppeplate. Fest deretter den ytre fikseringsplaten ca. 5-10 mm fra huden igjen som vist i **figur 8 (se side 33)**.

Hvis lekkasje fra stomiåpningen fortsetter etter korrigerings av fikseringsplaten, kan det hende at stomiåpningen har blitt for stor og det vil være nødvendig å benytte en PEG med større omkrets (20 FR). Husk da å bruke den koblingen som passer til 20 FR PEG.