

Dagbehandling via PEG/J

(16-timers behandling)

Kort brukerveiledning for Duodopa®-behandling dagtid via PEG- og intestinalsonde.


Morgenprosedyre

A. Koble til medisinen og starte pumpe

1. Ha pumpe i en veske og fest denne som anbefalt.
2. Fjern den røde beskyttelsesproppen fra kassettslangen og se til at alle klemmer er åpne.
3. Koble kassettslangen til intestinalsonde-koblingen på PEG/J-sonden (drei på kassettslangen, IKKE på PEG/J-sonden).
4. Hold inne **PÅ/AV** knappen i 3 sekunder for å starte pumpe
5. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å starte den kontinuerlige dosen. **INF** vises i displayet når den kontinuerlige dosen gis.



A1

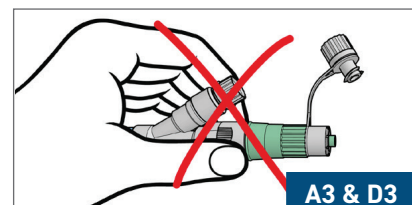


A3 & D3

B. Slik gis morgendose

Trykk **MORGENDOSE**-knappen to ganger for å gi morgendosen.

Etter at morgendosen er gitt vil pumpe automatisk gi den kontinuerlige dosen.

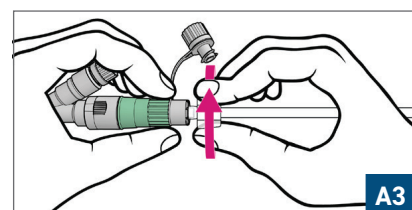


A3

Prosedyre gjennom dagen


C. Ved behov for en ekstrados

Trykk **EKSTRADOSE**-knappen en gang (to "pip" høres).


Etter at ekstradosen er gitt vil pumpe automatisk gi den kontinuerlige dosen.

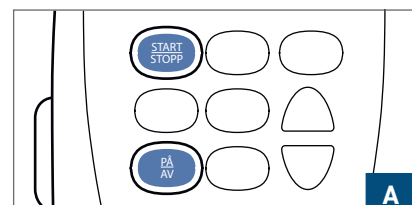

A

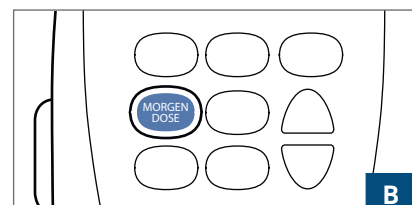

B



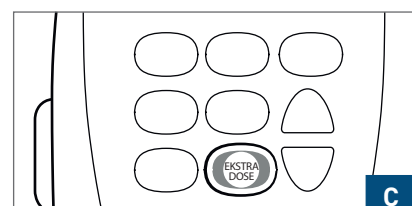


C

Kveldsprosedyre

D. Stoppe tilførselen av medisin, slå av pumpa og skylle sonden

1. Hold inne **START/STOPP**-knappen til (--- --- ---) forsvinner for å stoppe medisineringsen.
2. Hold inne **PÅ/AV**-knappen til (••• ••• •••) forsvinner for å slå av pumpa.
3. Koble kassettslangen fra intestinalsonde-koblingen på PEG/J-sonden (drei på kassettslangen, ikke på PEG/J-sonden).
4. Koble kassetten fra pumpa.
5. Koble en ww-adapter (hun/hun-adapter) til intestinalsonde-koblingen på PEG/J-sonden.
6. Benytt en 20 ml sprøyte og skyll med minimum 20 ml romtemperert vann.

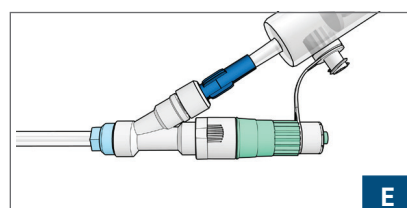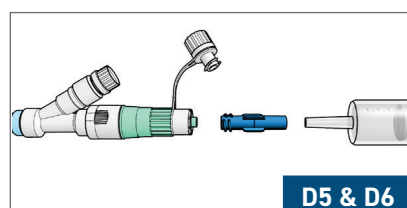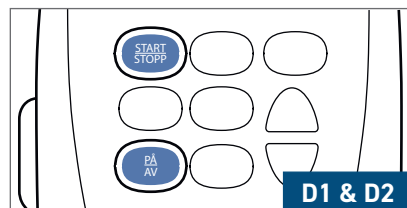

Daglig prosedyre

E. Skylle sondemellomrommet

Skyll både sideport og medisinport daglig med minst 20 ml romtemperert vann fra springen eller drikkevann. Skylls også etter at den har vært brukt til matning. Skylls ikke AbbVie PEG-sonden godt nok kan det føre til tilstopping eller blokkering.