







# Hurtig-guide: Daglige rutiner ved nasojejunal sonde (16-timers behandling)

## Morgenrutine: Koble til og starte pumpa

Fest pumpa forsvarlig i ei veske eller i en bæresele og deretter på pasienten. Koble pumpa med legemiddeltkassett til sonden.


1		Hold inne <b>PÅ/AV</b> i tre sekunder til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. <b>STOPPET</b> vises i displayet når selvtesten er ferdig.
2		Hold inne <b>START/STOPP</b> til (---- ---- ----) forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. Det står nå <b>INF</b> i displayet.
3		Trykk <b>MORGENDOSE</b> . Den innstilte morgendosen vises.
4		Trykk <b>MORGENDOSE</b> igjen. Dosen gis og i displayet vises nedtelling av dosen. Pumpa gir deretter den kontinuerlige dosen. <b>INF</b> vises igjen i displayet.

## Kveldsrutine: Stenge og koble fra pumpa

1		Hold inne <b>START/STOPP</b> til (---- ---- ----) forsvinner. <b>STOPPET</b> vises i displayet. Pumpa er stoppet og gir ikke infusjon.
2		Hold inne <b>PÅ/AV</b> til (.... .... ....) forsvinner.
3		Koble pumpa og forlengelsesslangen fra sonden.

NB! Nesesonden skal **IKKE** skylles. Den rommer 5 ml = 100 mg levodopa.

## Gi ekstra dose

1		Pumpa er <b>STARTET</b> <b>INF</b> vises i displayet.
2		Trykk på <b>EKSTRA DOSE</b> knappen. To "pip" høres. <b>BOLUS</b> vises i displayet – ekstradosen gis. Pumpa går automatisk tilbake til å gi kontinuerlig infusjon når ekstradosen er gitt. <b>INF</b> vises igjen i displayet.

