


Skifte av intestinalsonde

Ønskes ytterligere informasjon, kan sondesystemets veiledning leses.

Materiell


Saks, underlag, to arteriepinsetter (eller en arteriepinsett og en annen egnet pinsett), kompress, hansker og koblinger for den størrelse PEG (15 eller 20 Fr) som pasienten har.

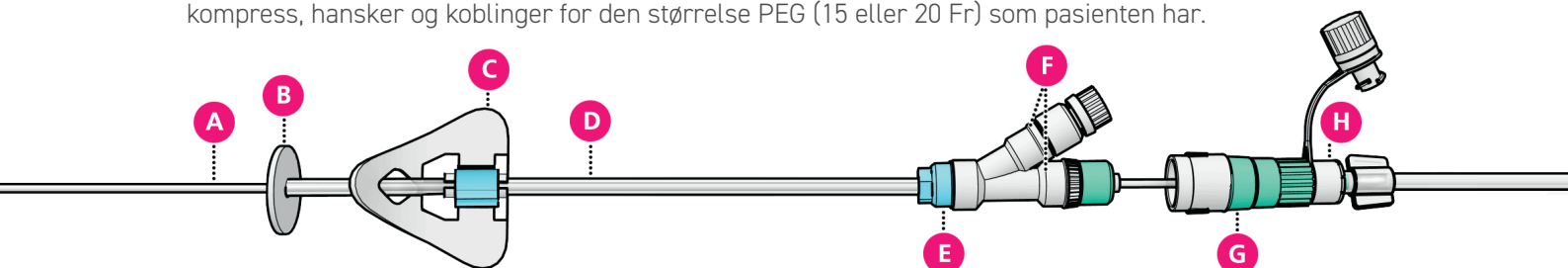


AbbVie PEG/J-sonde

A. Intestinalsonde B. Innvendig stoppeplate C. Utvendig fikseringsplate
D. PEG-sonde E. Blå/lilla festeskruer F. Y-stykke G. Klikk-kobling H. Luer-Lock kobling


Fjern den gamle koblingen

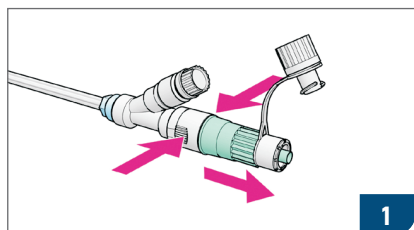

Fjern intestinalsonden ved å presse på markeringene på begge sider av klikk-koblingen og samtidig dra den ut.

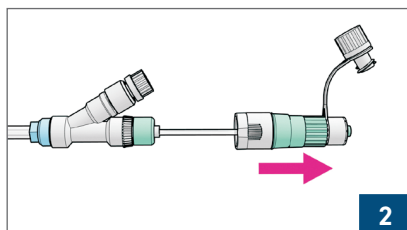


Dra ut den gamle intestinalsonden.

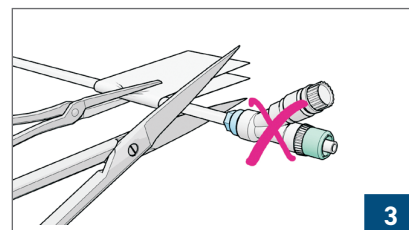


For å unngå lekkasje, legg på et kompress og steng av PEGen med en arteriepinsett. Gjør et rett kutt av PEGen så nær den gamle koblingen som mulig. Kast koblingen.


Klargjør intestinalsonden

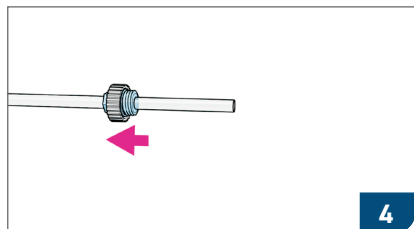


Tre den blå/lilla festeskruen på PEGen.

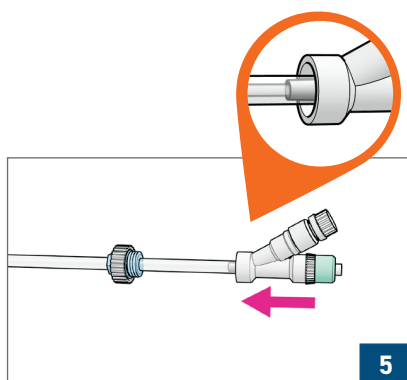


Tørk godt av PEGen. Tre Y-stykket så langt inn som mulig på PEGen slik at den er godt festet.

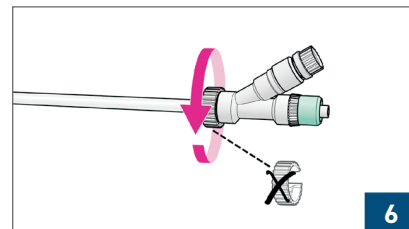


Skru sammen den blå/lilla feste-skruen og Y-koblingen. Kontroller at PEGen sitter fast i koblingen. Fjern den hvite "skrutrekkeren".

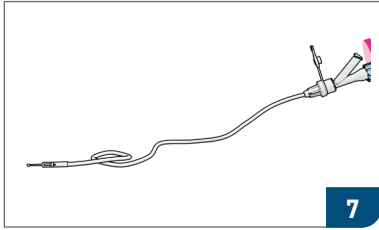


Løsne fikseringsskruen på den nye intestinalsonden.

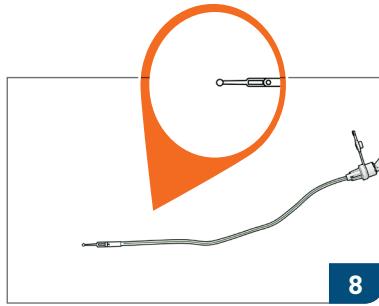


Før mandreggen helt frem til metallspissen på intestinalsonden. Vær forsiktig slik at den ikke stikker ut av sonden.

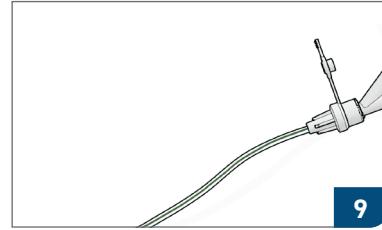


Fiksér mandreggen **godt** med fikseringsskruen.

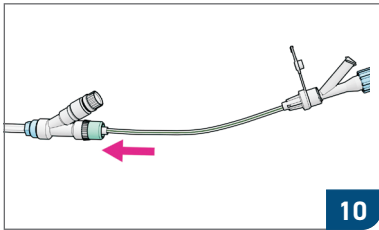

Før intestinalsondens ende inn i PEGen og før den ned i proksimale jejunum forbi Treitzske ligament i henhold til vanlig prosedyre.

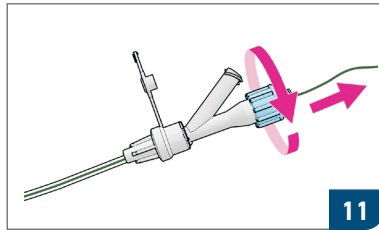


Løsne mandreggens fikseringsskruen og dra mandreggen ut av intestinalsonden.

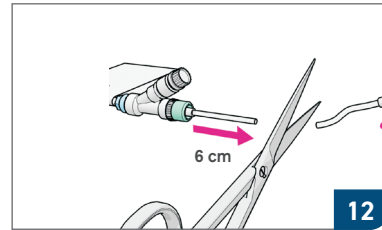


Fikser sondene ved hjelp av en arteriepinsett. Beskytt sonden med en kompress. Kutt intestinalsonden slik at den er ca. 6 cm.


Montering av klikk-koblingen

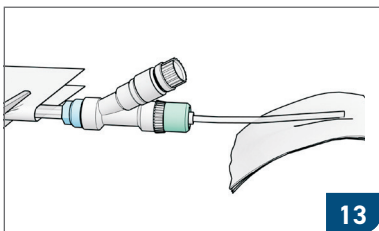


Tørk intestinalsonden godt med et kompress.

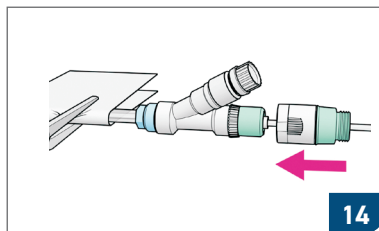


Tre den grønn/hvite klikk-koblingen på intestinalsonden. La det være et lite mellomrom mellom Y-koblingen og klikk-koblingen.

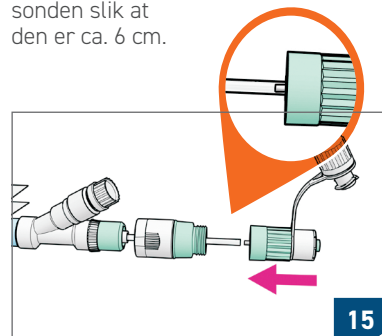


Sørg for at intestinalsonden og metallpinnen på Luer-Lock koblingen er tørre. Sørg for at intestinalsonden sitter godt og dekker hele metallpinnen før du går til neste steg.

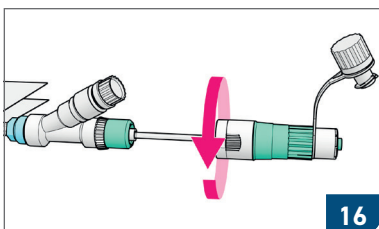

Skrue klikk-koblingen fast i Luer-Lock koblingen. Skru slik at den ikke kan reverseres. Vær nøye med å skru med klikk-koblingen slik at sonden ikke dreies.

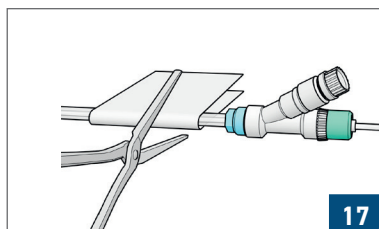

Løsne arteriepinsetten.

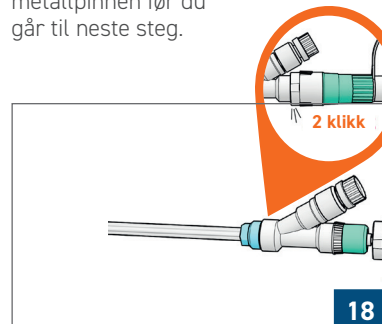

Klikk sammen Y-stykket og klikk-koblingen. **NB! 2 klikk.** Se til at markeringene er vendt slik illustrasjonen viser. Kontroller sondeleiet ved hjelp av røntgen.