

Starte behandling med nasojejunal sonde, fyller forlengelseslange og sonde

Ny pumpe stilles inn med pasientens doser. Pumpe og legemiddeltkassett med forlengelseslange er gjort klar. Når behandlingen med Duodopa skal starte, etter at nasointestinal sonde er på plass, brukes **FYLLE SETT** til å fyller forlengelseslangen og **EKSTRADOSE** for å fyller sonden, 5 ml (ikke bruk morgendosen, da denne har en tidslås på 20 timer).

1		For å slå på pumpa hold inne PÅ/AV i tre sekunder til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. STOPPET vises i displayet når selvtesten er ferdig.
2		Forlengelseslangen fylles ved å holde FYLLE SETT inne til (--- ---- ---) vises i displayet. Slipp tasten, hold den inne igjen. I displayet vises Fyller settet . Fyllerprosedyren stopper automatisk etter 1 ml (10 dobbeltsus). Gjenta prosedyren med å holde FYLLE SETT knappen inne til du ser at forlengelseslangen er fylt med legemiddel.
3		Koble sammen forlengelseslangen med den nasointestinale sonden, og åpne alle klemmer. Trykk på NESTE -tasten flere ganger til Ekstradose X,X ml vises i displayet.
4		Endre dose ved hjelp av piltastene til ekstradose ved oppstart er oppnådd (5 ml for å fyller nesensonden).
5		Bekreft doseendringen ved å trykke på BEKREFT/SLETT .
6		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. Det står nå INF i displayet.
7		Trykk EKSTRADOSE . To "pip" høres. BOLUS vises i displayet – ekstradosen gis. Pumpa går automatisk tilbake til å gi kontinuerlig infusjon når ekstradosen er gitt. INF vises igjen i displayet.
8		Når ekstradose ved oppstart er gitt, må pumpas ekstradose tilbakestilles til ordinær ekstradose.
9		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. STOPPET vises i displayet. Pumpa er stanset og gir ikke infusjon.
10		Trykk NESTE til ekstradose vises i displayet. Endre ekstradosen til ordinær dose ved hjelp av piltastene.
11		Trykk på BEKREFT/SLETT for å lagre den endrede verdien.
12		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. INF vises i displayet. Pumpa gir medisin.

Ref: Operatørmanual for CADDLegacyDuodopa Pumpe, juli 2018. Bruksanvisning AbbVie NJ- Nasojejunal sonde med mandreng, februar 2021.

