




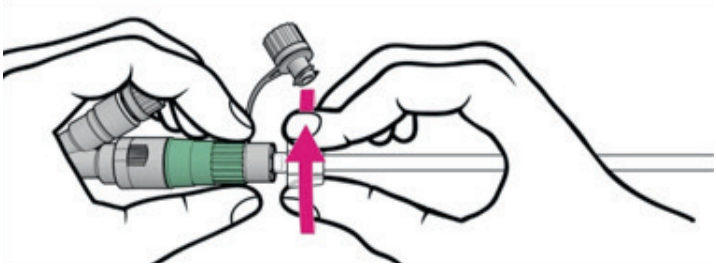

Starte behandlingen etter PEG-operasjon


Når behandlingen med Duodopa skal starte etter at PEG og intestinalsonde er på plass brukes **EKSTRADOSE** til å fylle sonden, 3 ml (ikke bruk morgendosen, da denne har en tidslås på 20 timer). Fra neste dag må morgendosen økes med 3 ml for å fylle sonden.

1		Hold inne PÅ/AV i tre sekunder til tekst vises i displayet. Pumpa gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. STOPPET vises i displayet når selvtesten er ferdig.
2		Trykk på NESTE -tasten flere ganger til Ekstradose X,X ml vises i displayet (3 ml for å fylle sonden + ekstradosen pasienten evt. bør få ved oppstart).
3		Endre dose ved hjelp av piltastene til ekstradose ved oppstart er oppnådd.
4		Bekreft doseendringen ved å trykke på BEKREFT/SLETT .
5		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. Det står nå INF i displayet.
6		Trykk EKSTRADOSE . To "pip" høres. BOLUS vises i displayet – ekstradosen gis. Pumpa går automatisk tilbake til å gi kontinuerlig infusjon når ekstradosen er gitt. INF vises igjen i displayet.
7		Når ekstradose ved oppstart er gitt må pumpas ekstradose tilbake tilles til ordinær ekstradose.
8		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. STOPPET vises i displayet. Pumpa er stoppet og gir ikke infusjon.
9		Endre ekstradosen til den ordinære ved hjelp av piltastene.
10		Lagre den endrede verdien.
11		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. Pumpa går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. INF vises i displayet. Pumpa gir medisin.




Hurtig-guide: Daglige rutiner ved PEG

1		<p>Koble pumpe med legemiddelkassett til sonden. Ikke vri på PEG-sonden, vri på kassettslangen.</p> 
2		<p>Fest pumpe forsvarlig i en veske eller i en bæresele og fest den på pasienten. Hold inne PÅ/AV i tre sekunder til tekst vises i displayet. Pumpe gjør en selvtest. Dette tar ca 30 sekunder. STOPPET vises i displayet når selvtesten er ferdig.</p>
3		<p>Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. Pumpe går gjennom/viser de innstilte verdiene. Det tar ca 15 sekunder. Det står nå INF i displayet. Pumpe gir nå den kontinuerlige dosen.</p>
4		<p>Trykk MORGENDOSE. Den innstilte morgendosen vises.</p>
5		<p>Trykk MORGENDOSE igjen. Dosen gis og i displayet vises nedtelling av dosen. Pumpe gir deretter den kontinuerlige dosen. INF vises igjen i displayet.</p>

Gi ekstra dose

1		<p>Pumpe er STARTET. INF vises i displayet.</p>
2		<p>Trykk EKSTRADOSE. To "pip" høres. BOLUS vises i displayet – ekstradosen gis. Pumpe går automatisk tilbake til å gi kontinuerlig infusjon når ekstradosen er gitt. INF vises igjen i displayet.</p>

Kveld: Stenge og koble fra pumpa

1		Hold inne START/STOPP til (---- ---- ----) forsvinner. STOPPET vises i displayet. Pumpa er stoppet og gir ikke medisin.
2		Hold inne PÅ/AV til (....) forsvinner.
3		Koble pumpa med legemiddelkassett fra sonden. Ikke vri på PEG-sonden, vri på kassettslangen.
4		Skyll intestinalsonden som inneholder medisin. Benytt en 20 ml sprøyte og skyll med vanlig drikkevann, minimum 20 ml. Benytt en ww-adapter mellom sprøyte og sonde. 
5		En medisinkassett kan brukes i opp til 24 timer etter at den er tatt ut av kjøleskapet. Legg pumpen lett tilgjengelig til neste morgen.

